


Så använder du hjärtstartaren LIFEPAK CR2.

Vid misstänkt hjärtstopp: Be någon att larma 112 och hämta hjärtstartaren. Starta HLR omgående.

- 1** Starta hjärtstartaren genom att öppna locket. Ta tag i locket vid den röda pilen och lyft. Följ hjärtstartarens röstinstruktioner, de kommer att vägleda dig för steg.



- 2** Ta bort alla kläder från bröstkorgen. Klipp om nödvändigt, torka fuktig hud och raka vid behov. Sax, rakhyvel och andningskydd ska finnas i D-HLR-etuiet.

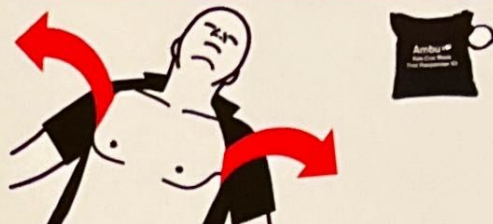

- 3** Dra i det röda handtaget för att ta fram elektroderna. Om det är ett barn under 8 år eller under 25 kg, tryck först på knappen barnläge.




- 4** Dra bort en elektrod i taget genom att dra i öglan och placera elektroden på bröstkorgen exakt som bilden visar på elektroden. Stryk fast elektroderna ordentligt mot bröstkorgen.



- 5** Rör inte personen. Hjärtstartaren analyserar nu hjärtrytmen. Om hjärtstartaren hittar en behandlingsbar rytm kommer den att uppmana dig att trycka på defibrilleringsknappen.



- 6** Tryck på den röda blinkande knappen om defibrillering rekommenderas. Se till att ingen är i fysisk kontakt med personen.

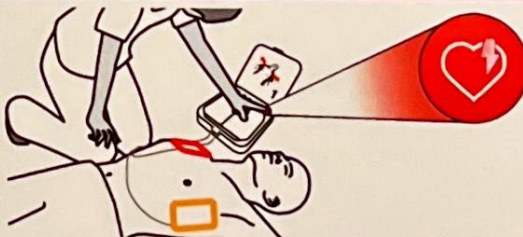

- 7** Starta hjärt-lungräddning. Låt elektroderna sitta kvar. HLR ska pågå med så få avbrott som möjligt. Fortsätt att följa hjärtstartarens instruktioner. Med två minuters mellanrum upprepas analysen.

